

SAMUS[®]

SMEP502H

Platformă electrică pentru transport pe scări – 210 kg

VĂ MULȚUMIM PENTRU ALEGEREA FĂCUTĂ!

- Vă mulțumim că ați ales un produs Samus și pentru încrederea acordată brandului nostru. Dorim să vă oferim cea mai bună experiență de utilizare, motiv pentru care vă invităm să descoperiți resursele și suportul puse la dispoziție.
- Pe canalul nostru oficial de YouTube și pe site-ul www.samus.ro găsiți tutoriale video, recomandări utile și demonstrații practice care vă vor ajuta să folosiți aparatul la potențial maxim.
- Vă încurajăm să vă înregistrați produsul pe site pentru noutăți exclusive și informații viitoare.
- Alăturați-vă comunității Samus pe rețelele de socializare, unde veți descoperi sfaturi, idei și experiențe împărtășite de alți utilizatori.
- În plus, vă invităm să explorați întreaga noastră gamă de produse Samus, creată pentru a vă face viața mai ușoară și mai plăcută.



SCANAȚI CODUL QR

și descoperiți tutoriale video și recomandările Samus, create pentru o experiență de utilizare simplă și rapidă.



website
www.samus.ro



Facebook
[samus.romania](https://www.facebook.com/samus.romania)




Instagram
[samus.romania](https://www.instagram.com/samus.romania)



SAMUS[®]

SMEP502H

Platformă electrică pentru transport
pe scări – 210 kg

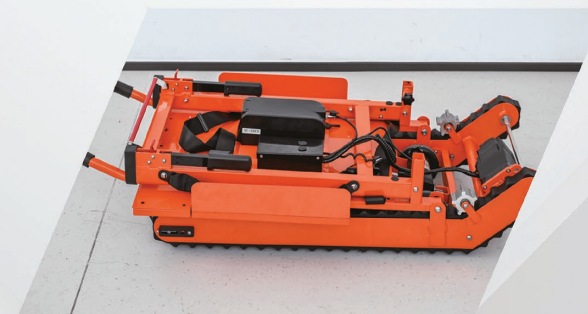

MANUAL DE UTILIZARE

Pentru siguranță și utilizare corectă
respectați instrucțiunile din manual

Stimate client,

Pentru o utilizare sigură și eficientă, vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile din acest manual înainte de folosirea scaunului electric pentru transport pe scări.

Siguranța în utilizare depinde nu doar de atenție și îndemânare, ci și de înțelegerea corectă a funcționării și caracteristicilor acestui echipament. Verificați întotdeauna starea dispozitivului înainte de fiecare utilizare.

De asemenea, este esențial să efectuați întreținerea periodică a echipamentului pentru a asigura funcționarea optimă și pentru a preveni eventualele defecțiuni.



Informații importante

Înainte de utilizare, citiți cu atenție acest manual și verificați toate componentele echipamentului pentru a vă asigura că funcționează în condiții de siguranță. Dacă observați orice defecțiune sau anomalie, contactați imediat furnizorul sau service-ul autorizat.

Utilizați echipamentul numai conform instrucțiunilor. În timpul utilizării pe scări, mențineți o poziție stabilă și controlați permanent dispozitivul. În condiții de umezeală, suprafețe alunecoase sau scări dificile, acționați cu prudență și reduceți viteza de operare.

Pentru siguranța utilizatorului și a persoanei transportate, nu permiteți utilizarea echipamentului de către persoane neinstruite sau fără experiență.

Nu demontați și nu modificați echipamentul fără autorizare. Astfel de intervenții pot genera riscuri majore de siguranță. Pentru reparații sau înlocuirea componentelor, adresați-vă exclusiv service-ului autorizat sau producătorului.

Fișa produsului >>>

În această fișă veți găsi pe scurt informațiile esențiale despre produs: denumirea și modelul, principalele funcții, specificațiile tehnice, accesoriile incluse și recomandările de utilizare. Vă oferă o privire rapidă de ansamblu, astfel încât să cunoașteți imediat ce poate face produsul.

Producător

SAMUS®

Model

SMEP502H

Dimensiuni desfășurate (L x l x H; unitate: cm)

(105±5)x(50±3)x(115±2)

Dimensiuni pliate (L x l x H; unitate: cm)

(105±5)x(50±3)x(154±2)

Dimensiuni platformă (L x l; unitate: cm)

66x49

Dimensiune roți față/spate

4 / 5 inch

Unghiul șenilei

0–20° (±5°)

Capacitate maximă de încărcare

210 kg

Viteză de ridicare

Viteză ajustabilă

Controler

Viteză medie: 40 pași/min (±5%)

Baterie

24 V / 13 Ah

Parametri motor

Motor fără perii, 400 W

Greutate netă produs

41.2±3 kg

Fabricat în PRC

CONDIȚII DE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transport: Evitați șocurile, vibrațiile puternice, expunerea directă la soare și contactul cu ploaia.

Depozitare: Depozitați produsul în interior, într-un spațiu uscat, bine ventilat, cu o umiditate relativă sub 80% și ferit de gaze corozive.

CURĂȚARE

Curățați scaunul electric pentru scări și componentele acestuia cu o cârpă curată sau o perie moale și apă caldă cu săpun. Clătiți cu apă caldă și lăsați să se usuce la aer.


Nu curățați folosind produse care conțin înălbitor sau fenol. Dacă este necesar, se poate utiliza o perie cu peri rigizi.



Avertizări:

1. Nu lăsați niciodată persoana transportată nesupravegheată în scaunul electric pentru scări și utilizați întotdeauna centurile de siguranță.
2. Evitați schimbarea rapidă a poziției, deoarece acest lucru poate duce la accidentarea persoanei transportate. Susțineți echipamentul în timpul ajustării mânerelor.
3. Întreținerea necorespunzătoare poate cauza accidentări. Utilizați și întrețineți scaunul electric pentru scări doar în scopul descris în acest manual.

DENUMIRE COMPONENTE ȘI PREZENTARE PRODUS >>>>

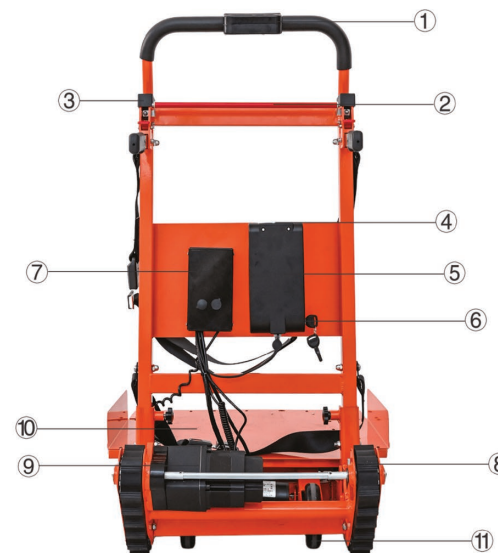

1. Panou de control
2. Reglarea ghidonului
3. Mâner
4. Indicator nivel baterie
5. Baterie litiu
6. Buton de pornire
7. Controler placă de circuit
8. Structura șenilei
9. Motor
10. Placă de rulment pliabilă
11. Roată spate de 5 inch

Componentă structurală: Compus dintr-un cadru de susținere, roți pivotante, stabilizatori de bază, braț de ridicare, ansamblu controler, centură de siguranță și alte componente.

Funcții și caracteristici: Potrivit pentru transportul și manipularea mărfurilor pe suprafețe plane sau pe scări. Aplicabil pentru scări drepte cu un unghi de înclinare mai mic de 50°.


Se utilizează: de către personal instruit.

Caracteristici produs: Este sigur, ușor și rapid de utilizat și poate fi pliat cu ușurință.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE»»»»

INSTALAREA BATERIEI

Așezați echipamentul în poziție pliată pe o suprafață plană. Introduceți bateria și aliniați-o corect cu locașul de montare al echipamentului, apoi fixați-o în poziție.

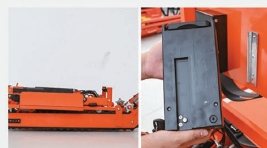

Introduceți bateria în locașul dedicat al echipamentului, conectați cablul de alimentare, apoi fixați bateria prin strângerea piuliței.



VERIFICAREA NIVELULUI BATERIEI ȘI ÎNCĂRCAREA

Verificarea nivelului bateriei

Rotiți cheia în poziția ON și apăsați butonul roșu de pe controler. Dacă bateria este încărcată, ecranul va afișa nivelul de energie rămas.

Dacă nivelul bateriei este sub 10%, încărcați bateria cât mai curând posibil.

Încărcare

Dacă este necesară încărcarea, aceasta trebuie efectuată cu alimentarea oprită.

Introduceți cablul încărcătorului în portul de încărcare al bateriei, apoi conectați-l la rețeaua electrică pentru a începe încărcarea.

După finalizarea încărcării, deconectați cablul încărcătorului și reconectați cablul de alimentare pentru utilizarea echipamentului.



	Inspecție	Verificare	Acțiune în caz de defect
Sistem control electronic	Instrument operare	Buton pornire	Înlocuire
		Comutator sus/Jos	Înlocuire
		Frână parcare	Înlocuire
		Indicator baterie	Înlocuire
	Centură siguranță	Cablaj rupt sau răsucit	Corectare / Înlocuire
	Cutie control	Deteriorare / desprindere	Corectare / Înlocuire
Parte de rulare	Șenilă	Priză	Deteriorare priză
		Deteriorare priză	Înlocuire
		Crăpături / uzură severă	Înlocuire
	Șenilă	Slăbire	Corectare
		Aliniere incorectă	Corectare
	Motor	Zgomot anormal	Înlocuire
	Pinion	Deteriorare	Înlocuire
	Angrenaj	Deteriorare	Înlocuire
Secțiune mâner	Roți	Uzură / deteriorare	Înlocuire
		Suport anti-înclinare	Mișcare lină
Cutie baterie	Carcasă baterie	Mișcare lină	Corectare
		Deteriorare	Corectare / Înlocuire
	Celulă baterie	Deteriorare priză	Înlocuire
Încărcare	LED	Crăpături / deteriorare	Înlocuire
		Deteriorare	Înlocuire
	Ștecher	Deteriorare	Înlocuire
Altele	Cablaj	Rupere / crăpare	Corectare / Înlocuire
		Șuruburi	Slăbire / desprindere
			Strângere / montare

15. Este strict interzisă urcarea sau coborârea scârilor în unghi – acest lucru este extrem de periculos!
16. Operatorul nu trebuie să dea drumul brațelor de sprijin cu ambele mâini în niciun moment!
17. În timpul utilizării, apăsați ferm pe brațele de sprijin pentru a menține echilibrul general al echipamentului!
18. Dacă operatorul nu poate controla complet echipamentul în mod independent, trebuie să existe un asistent în fața acestuia pentru a menține echilibrul.
19. La începerea urcării scârilor, echipamentul se va înclina în sus; asigurați-vă că apăsați pe brațele de sprijin!
20. La urcare, acordați atenție părții din spate! La coborâre, acordați atenție părții din față!
21. Înainte de a coborî scările, faceți o pauză pe primele două trepte pentru a permite șenilelor să se așeze corect și pentru a asigura echilibrul echipamentului.
22. Dacă este necesară o oprire de urgență în timpul urcării sau coborârii scârilor sau dacă trebuie să vă opriți la jumătate, asigurați-vă că șenilele sunt sprijinite simultan pe trei trepte. În acest moment, puteți opri alimentarea de urgență intermediară.
23. În timpul coborârii scârilor, mențineți roțile din față cât mai departe de marginea treptelor. Ridicați roțile din față, permiteți șenilelor să atingă suprafața și țineți brațele de sprijin cu ambele mâini pentru a menține stabilitatea.
24. La urcarea scârilor, când ajungeți la ultima treaptă, mențineți apăsat butonul „Urcare” cu mâna dreaptă și sprijiniți-vă de brațul de susținere cu mâna stângă pentru a ridica treptat echipamentul. Când toate cele 4 roți ale echipamentului ating solul, îndepărtați imediat echipamentul de marginea treptei pentru a preveni alunecarea, cauzată de imposibilitatea operatorului de a-l controla.
25. Dacă apar vătămări corporale din cauza nerespectării instrucțiunilor de către utilizator (și nu din cauza unei defecțiuni mecanice a produsului), utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate.
26. Nu părăsiți produsul în timpul funcționării, cu excepția situațiilor de urgență. Atunci când greutatea încărcăturii depășește 80 kg, se recomandă prezența unui al doilea operator.
27. Utilizarea necorespunzătoare va afecta în mod semnificativ durata de viață a echipamentului.
28. Pentru utilizarea în siguranță a produsului și pentru menținerea duratei sale de viață, efectuați întreținere zilnică și inspecții periodice.

ÎNȚEȚINERE ȘI MENTENANȚĂ »»»

Efectuați întreținerea zilnică și verificările conform tabelului de mai jos. În cazul unor anomalii sau defecțiuni de cauză necunoscută, nu încercați să remediați problema pe cont propriu și contactați direct distribuitorul autorizat.

PREGĂTIREA ECHIPAMENTULUI PENTRU UTILIZARE

1. Desfășurarea și plierea cadrului



Slăbiți butoanele de fixare de pe ambele părți ale cadrului principal, după care cadrul poate fi pliat sau desfășurat.

2. Desfășurarea și plierea cotierei



Pentru a desface cotiera, ridicați-o până când se fixează în locașul de blocare.

Pentru a o plia, apăsați butonul roșu și coborâți cotiera simultan.

3. Blocarea și deblocarea roților



Apăsați pe poziția OFF a mecanismului de blocare de la roata din spate pentru a bloca roata; apăsați pe poziția ON pentru a debloca frâna roții.

4. Desfășurarea și retragerea plăcilor laterale extensibile



Trageți plăcile laterale extensibile spre exterior, după necesitate.

Împingeți-le înapoi spre interior pentru a reveni în poziția inițială.

5. Reglarea înălțimii barei spătarului



Apăsați bara orizontală roșie în jos și, în același timp, ridicați sau coborâți bara spătarului pentru a ajusta înălțimea. Sunt disponibile trei niveluri de reglaj.

EXPLICAȚIA BUTOANELOR CONTROLERULUI

	Urcare scări		Coborâre scări
	Pliere șenile (roți auxiliare)		Desfășurare șenile (roți auxiliare)
	Creștere viteză		Reducere viteză
	Pornire/Oprire lumină		Pornire/Oprire controler



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE PENTRU URCAREA ȘI COBORÂREA SCĂRILOR

Pornirea alimentării și activarea controlerului

Rotiți cheia în poziția ON pentru a activa alimentarea bateriei. Apoi apăsați butonul roșu de pe panoul de control pentru a activa controlerul.

Instrucțiuni de utilizare pentru urcarea scărilor

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Urcare” pentru a deplasa echipamentul pe prima treaptă a scărilor.



Așteptați activarea sistemului de auto-echilibrare, ridicați platforma de încărcare într-o poziție adecvată, apoi apăsați butonul „Urcare” pentru a începe urcarea scărilor.



După ajungerea pe palier, apăsați butonul „Desfășurare șenile” din partea dreaptă pentru a coborî roțile auxiliare, apoi coborâți platforma de încărcare.

Notă: Asigurați-vă că echipamentul este complet așezat pe o suprafață plană înainte de a coborî platforma de încărcare. Acest lucru finalizează procesul de urcare și coborâre a scărilor.



Instrucțiuni de utilizare pentru coborârea scărilor



Poziționați echipamentul în zona de mijloc a șenilei și apăsați butonul „Pliere șenile” pentru a reține roțile auxiliare. După activarea sistemului de auto-echilibrare, ridicați platforma de încărcare într-o poziție stabilă.

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Coborâre” pentru a începe deplasarea pe scări.

După ajungerea pe palier, apăsați butonul „Desfășurare șenile” pentru a coborî roțile auxiliare, apoi coborâți platforma de încărcare.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII »»»


1. Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual, să urmați instrucțiunile personalului tehnic al distribuitorului și să utilizați efectiv echipamentul sub îndrumarea acestuia. Puteți folosi produsul în mod independent doar după ce personalul tehnic confirmă că operarea este corectă.
2. Greutatea maximă admisă pentru acest produs este de 210 kg. Nu utilizați produsul cu o sarcină mai mare pentru a evita pericolele.




scară spirală



scară curbată

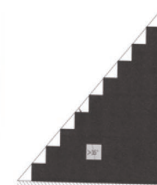

scară cu unghi mai mare de 50°

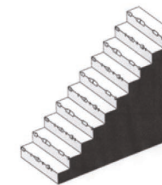

scară cu suprafețe denivelate și neregulate

3. Acest produs nu trebuie utilizat pe scări în spirală, scări curbe, scări cu un unghi mai mare de 50° sau pe pante abrupte, nici pe scări cu suprafețe rugoase sau denivelate. Nu utilizați produsul pe trepte alunecoase din cauza uleiului, gheții, umezelii sau a altor factori.
4. Înainte de utilizare, asigurați-vă că efectuați verificările de siguranță necesare (de exemplu: șenilele/roțile, nivelul bateriei, îmbinările tuturor componentelor etc.).
5. Vă rugăm să utilizați bateria originală furnizată de producător și să o încărcați într-un mediu uscat.
6. Bateria acestui produs este reutilizabilă. Dacă este necesară înlocuirea, vă rugăm să contactați personalul producătorului pentru efectuarea acesteia.
7. Nu deschideți și nu înlocuiți bateria pe cont propriu pentru a evita pericolele. Eliminați bateria uzată în conformitate cu reglementările privind deșeurile din țara dumneavoastră.
8. Dacă produsul prezintă defecțiuni sau este deteriorat, vă rugăm să contactați agentul local. Acest produs poate fi reparat doar de către personal de întreținere autorizat.
9. Nu utilizați forțat produsul în cazul în care acesta prezintă defecțiuni sau este puternic uzat.
10. Acest produs trebuie utilizat și depozitat departe de surse de foc deschis.
11. Acest produs este destinat utilizării exclusiv de către persoane care au citit cu atenție manualul de utilizare și au beneficiat de instruire corespunzătoare!
12. Țineți sugarii, copiii și animalele de companie departe de acest produs pentru a evita accidentele.
13. Atunci când utilizați produsul pentru urcarea sau coborârea scărilor, asigurați-vă că fixați corespunzător încărcătura cu o centură de siguranță pentru a preveni răsturnarea acesteia spre stânga sau dreapta.
14. Operatorii ar trebui, de preferință, să fie bărbați cu vârsta sub 50 de ani; persoanele vârstnice sau cele cu slăbiciuni fizice nu sunt autorizate să utilizeze acest produs.